

SCHEDA TECNICA

starttest® Giardia (GIA Ag)

starttest® Giardia (GIA Ag) sviluppato e prodotto da VetMotive Srl, è un test rapido per la rilevazione qualitativa di Giardia nelle feci del cane.

Il Test Giardia (GIA Ag) è destinato all'uso professionale da parte di operatori sanitari.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- (1) 10 Dispositivi per test Giardia
- (2) 10 Contagocce monouso
- (3) 10 Falconi di reagente
- (4) 10 Tamponi sterili
- (5) 1 Foglietto illustrativo

PROCEDURA PER EFFETTUARE IL TEST

- Posizionare orizzontalmente il dispositivo su una superficie pulita.
- Prelevare, servendosi del tampone, il campione di feci e inserirlo nel flacone contenente il reagente.
- Prelevare dal flacone la miscela, con il contagocce monouso e versare 4 gocce (100µL) di miscela nel pozzetto (allontanare il sedimento in caso di ostruzione).
- Il risultato sarà visibile in 5-10 minuti.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

- 1) Positivo: Vengono visualizzate entrambe le bande C e T, (indipendentemente dal fatto che la banda T sia marcata o meno).
- 2) Negativo: Viene visualizzata la banda C di controllo.
- 3) Non valido: La banda di controllo qualità C non viene visualizzata indicando che il test non è valido, indipendentemente dal fatto che la banda di rilevamento T venga visualizzata o meno.

PRECAUZIONI

- Tutti i dispositivi contenuti nella scatola sono monouso, non riutilizzare.
- Non spostare la striscia reattiva dopo l'applicazione del campione.
- I componenti di questo kit sono stati sottoposti a controllo qualità come lotto standard. Non mescolare i componenti di lotti diversi.
- Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

CONSERVAZIONE

- I kit devono essere conservati tra i 2 e i 30°C. **NON CONGELARE.**
- Proteggere dalla luce diretta del sole.
- Utilizzare i test con un tasso di umidità tra il 10 e il 90%.
- Non utilizzare i kit oltre la data di scadenza.