

SCHEDA TECNICA

starttest® Parvovirus Canino (CPV Ag),

starttest® Parvovirus Canino (CPV Ag), sviluppato e prodotto da VetMotive Srl, è un test rapido per la rilevazione qualitativa dell'antigene del Parvovirus Canino nelle feci del cane. Il Test CPV Ag è destinato all'uso professionale da parte di operatori sanitari.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

5 Dispositivi per test CPV Ag
5 Contagocce monouso
5 Flacons di reagente
5 Tamponi sterili
1 Foglietto illustrativo

PROCEDURA PER EFFETTUARE IL TEST

- Posizionare orizzontalmente il dispositivo su una superficie pulita.
- Prelevare, servendosi del tampone, il campione di feci e inserirlo nel flacone contenente il reagente.
- Mescolare il tampone con il reagente assicurandosi che il campione sia sciolto completamente nel reagente.
- Prelevare dal flacone la miscela, con il contagocce monouso e versare 4 gocce (100 µL) di miscela nel pozzetto (allontanare il sedimento in caso di ostruzione).
- Il risultato sarà visibile in 5-10 minuti

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

- 1) Positivo: Vengono visualizzate entrambe le bande C e T, (indipendentemente dal fatto che la banda T sia marcata o meno).
- 2) Negativo: Viene visualizzata la banda C di controllo.
- 3) Non valido: La banda di controllo qualità C non viene visualizzata indicando che il test non è valido, indipendentemente dal fatto che la banda di rilevamento T venga visualizzata o meno.

PRECAUZIONI

- Tutti i dispositivi contenuti nella scatola sono monouso, non riutilizzare.
- Non spostare la striscia reattiva dopo l'applicazione del campione.
- I componenti di questo kit sono stati sottoposti a controllo qualità come lotto standard. Non mescolare i componenti di lotti diversi.
- Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

CONSERVAZIONE

- I kit devono essere conservati tra i 2 e i 30°C. **NON CONGELARE.**
- Proteggere dalla luce diretta del sole.
- Utilizzare i test con un tasso di umidità tra il 10 e il 90%.
- Non utilizzare i kit oltre la data di scadenza.