

SCHEDA TECNICA

starttest® VLabs 4X E. Canis Ab/Lyme Ab/Anaplasma Ab/Dirofilaria Ag

starttest® VLabs 4X E. Canis Ab/Lyme Ab/Anaplasma Ab/Dirofilaria Ag, sviluppato e prodotto da VetMotive Srl, è un test rapido per la rilevazione qualitativa dell'anticorpo dell' Ehrlichia Canis, dell' anticorpo della Borrelia Burgdorferi responsabile della malattia di Lyme , dell'anticorpo dell' Anaplasma, dell'antigene della Dirofilaria Immitis nel sangue del cane.

Il Test VLabs 4X è destinato all'uso professionale da parte di operatori sanitari.

PROCEDURA PER EFFETTUARE IL TEST

- Posizionare il dispositivo orizzontalmente su una superficie pulita.
- Prelevare il siero o plasma del cane e centrifugarlo nella provetta con EDTA.
- Prelevare il campione di siero o plasma con il contagocce monouso e far gocciolare 1 goccia (20 µL) di campione nel pozzetto.
- Subito dopo versare 4 gocce (100 µL) di reagente in ogni pozzetto.
- Il risultato sarà visibile in 5-10 minuti.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

- 1) Positivo: Vengono visualizzate entrambe le bande C e T, (indipendentemente dal fatto che la banda T sia marcata o meno).
- 2) Negativo: Viene visualizzata la banda C di controllo.
- 3) Non valido: La banda di controllo qualità C non viene visualizzata indicando che il test non è valido, indipendentemente dal fatto che la banda di rilevamento T venga visualizzata o meno.

PRECAUZIONI

- Tutti i dispositivi contenuti nella scatola sono monouso, non riutilizzare.
- Non spostare la striscia reattiva dopo l'applicazione del campione.
- I componenti di questo kit sono stati sottoposti a controllo qualità come lotto standard. Non mescolare i componenti di lotti diversi.
- Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

CONSERVAZIONE

- I kit devono essere conservati tra i 2 e i 30°C. NON CONGELARE.
- Proteggere dalla luce diretta del sole.
- Utilizzare i test con un tasso di umidità tra il 10 e il 90%.
- Non utilizzare i kit oltre la data di scadenza.