


I consigli del nostro esperto!

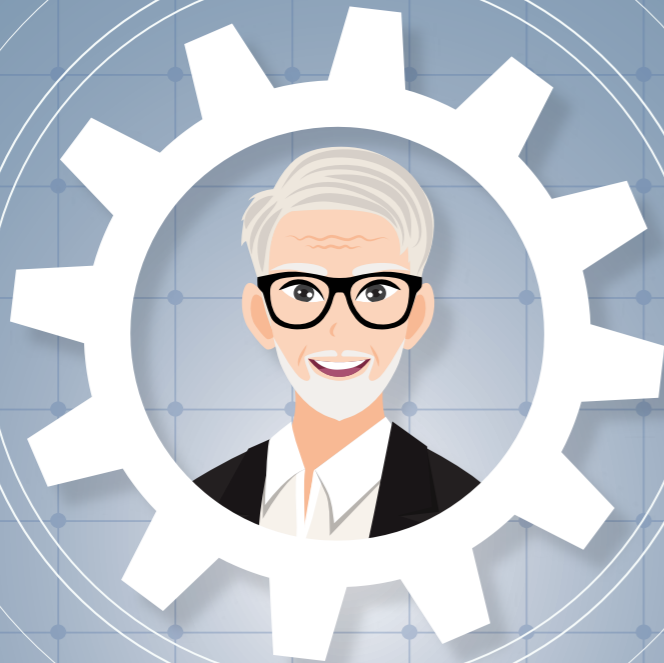

**SUGGERIMENTI UTILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE NOSTRE AUTOCLAVE**



**1 VOLTA AL MESE**

**LUBRIFICA LA VITE DI CHIUSURA PORTELLO**

(Grasso per lubrificare cod. 00008739)




**PULISCI IL FILTRO ARIA**




**1 VOLTA AL MESE**

**PULISCI IL FILTRO CAMERA, SVITANDO LA VITE**

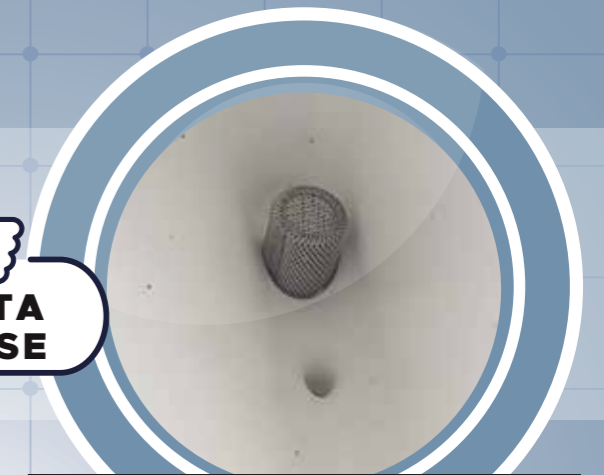

**PULISCI I FILTRI VASCHE**

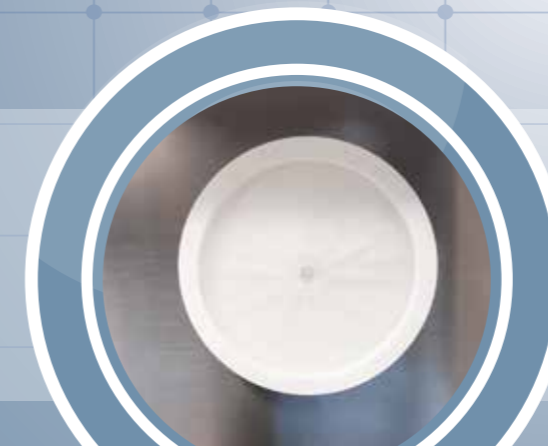

**SOSTITUISCI IL FILTRO BATTERIOLOGICO OGNI 500 CICLI O QUANDO DA BIANCO DIVENTA GRIGIO**

(Filtro antibatterico cod. 00009309)

“ *Almeno una volta ogni anno, oppure ogni 1000 cicli, ricorda di chiedere una manutenzione specializzata: il nostro Servizio Tecnico è a tua disposizione!* ”



**INQUADRA IL QR-CODE A LATO PER RICHIEDERE ASSISTENZA SUL NOSTRO PORTALE**  
Compila il modulo Online specificando il modello dell'apparecchiatura e il problema riscontrato. Vi contatteremo per formulare un preventivo di spesa, sulla base delle Vostre esigenze!  
[www.foschigroup.com/assistenza-tecnica](http://www.foschigroup.com/assistenza-tecnica)  
Email: [service@foschigroup.com](mailto:service@foschigroup.com) | Telefono: 06.417.905.850