

SICCOSTIL[®]

SPRAY

ACIDO IALURONICO
E LIPOSOMI



SPRAY OCULARE

CON NEBULIZZATORE
LENITIVO IDRATANTE



SICCOSTIL SPRAY oculare è un prodotto ad uso oftalmico per **cani gatti, cavalli non DPA e conigli d'affezione** costituito da una soluzione salina sterile, isotonica, con Acido ialuronico e Liposomi indicata per lubrificare, idratare, rinfrescare e proteggere la superficie oculare e perioculare.

SICCOSTIL SPRAY, grazie all'erogatore, realizza una delicata nebulizzazione della soluzione, idonea sia a occhio aperto che a occhio chiuso, donando sollievo anche alla contestuale zona palpebrale e perioculare in caso di secchezza, disidratazione e ipersensibilità.

L'Acido ialuronico applicato localmente, è un polimero in grado di lubrificare, idratare e proteggere la superficie oculare, stabilizzando lo strato acquoso del film lacrimale. I liposomi a matrice fosfolipidica (bilayer fosfolipidici) sono strutture a doppio strato di fosfolipidi che svolgono un'elevata azione idratante e contribuiscono a prevenire l'evaporazione rapida delle molecole di acqua dal film lacrimale, favorendone la stabilità e la persistenza sulla superficie oculare.

SICCOSTIL SPRAY non contiene conservanti, Benzalconio cloruro, Clorexidina, Parabeni e Thimerosal, risultando ad elevato grado di tollerabilità e idoneo anche in caso di applicazioni frequenti e prolungate.

COMPOSIZIONE

Acqua depurata, fosfolipidi di soia (Liposomi) 5%, Polietilenglicole-400 (PEG-400), Acido bórico, Sodio cloruro, Sodio tetraborato, Disodio edetato, Carbossi Metil beta glucano, Poliesametilenguanide (PHMB), Sodio ialuronato 0,02%.

MODALITÀ D'USO

- Togliere il cappuccio e tenere il flacone ben impugnato nella mano dominante in modo che il pollice o indice sia ben saldo sull'erogatore facendo attenzione a non coprire il foro d'uscita.
- Tenere ferma la testa dell'animale contenendo il muso con la mano non dominante,
- avvicinare il flacone a una distanza di circa 10 cm dall'occhio e applicare una pressione decisa sull'erogatore.
- Si consiglia di applicare due nebulizzazioni due tre volte al giorno.
- Premiare l'animale dopo l'applicazione.


MISURE PRECAUZIONALI E AVVERTENZE

- Prodotto oftalmico per uso esterno veterinario.
- Evitare di toccare l'occhio con la punta del flacone.
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.
- Lasciar trascorrere 10-15 minuti tra l'instillazione di Siccostil Spray e l'eventuale instillazione di farmaci o prodotti per uso oftalmico esterno.
- Non utilizzare in caso di ipersensibilità soggettiva o incompatibilità nota verso qualsiasi componente della preparazione.
- Utilizzare il flacone entro 90 giorni dalla prima apertura.
- Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
- Conservare a temperatura compresa tra 5 e 35 °C.
- Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

CONFEZIONE: Flacone da 10 ml con contagocce

USO ESTERNO – SOLO PER USO VETERINARIO

FOR MORE LANGUAGES:

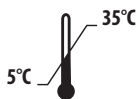

STERILE A

Inquadra QR code per differenziare i rifiuti

FLACONE CONTAGOCCE	TAPPO	ASTUCCIO	FOGLIETTO ILLUSTRATIVO ETICHETTA
LDPE04	PP05	PAP21	PAP22
PLASTICA RACCOLTA DIFFERENZIATA		CARTA RACCOLTA DIFFERENZIATA	

Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti

3BF **trebifarma**
ANIMAL HEALTH