

# RIPAGEL® VET

Idrogel Oftalmico sterile

Flacone in polietilene 10 ml



Uso veterinario

## CONFEZIONE

RIPAGEL® VET flacone da 10 ml in polietilene con tappo a vite, contenente gel acquoso oftalmico sterile, presentato in astuccio in cartone.

## PROPRIETÀ

RIPAGEL® VET è un idrogel, sterile, isotonico, costituito da un'associazione all'1,2% di acido ialuronico ad alto peso molecolare a lunga catena e di acido ialuronico cross-linkato. Contiene ciclodestrina e povidone ioduro (PVP-I).

RIPAGEL® VET grazie all'elevata concentrazione in acido ialuronico in generale e alla presenza del cross-linkato è in grado di aumentare il tempo di adesione alla cornea favorendo così e accelerando il naturale processo di cicatrizzazione.

RIPAGEL® VET modula il processo di riparazione e mantiene allo stesso tempo igienizzata la superficie oculare per la presenza nella formulazione di una bassa ma efficace concentrazione di PVP-I.

## INDICAZIONI

RIPAGEL® VET è indicato nella riparazione della superficie oculare e nella riepitelizzazione delle lesioni corneali causate da traumi, corpi estranei, sfregamenti, infiammazioni, infezioni ed anche più in generale nelle alterazioni del film lacrimale.

Il RIPAGEL® VET può essere impiegato in tutti i casi di ulcere molto profonde ed anche in quelle superficiali croniche idiopatiche.

## MODO D'USO E POSOLOGIA

Lavarsi accuratamente le mani.

Estrarre il flacone dall'astuccio in cartone ed eliminare il sigillo di sicurezza in plastica posto sul collo del flacone.

Svitare il tappo.

Con la mano non dominante tenere ferma e sostenere la testa dell'animale inclinandola leggermente indietro. Con l'altra mano tenere il flacone di **RIPAGEL® VET** mantenendo il flacone in posizione verticale sopra l'occhio con la punta rivolta verso il basso.



Instillare 1 o 2 gocce di idrogel nell'occhio da trattare, schiacciando leggermente il flacone in plastica e avendo cura di non toccare l'occhio con la punta del flacone.

La posologia suggerita è di 1 o 2 gocce nell'occhio da trattare, 3 volte al giorno o secondo il parere del Medico Veterinario in relazione alla gravità del trauma corneale.

## **MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E VALIDITÀ**

Mantenere il prodotto al riparo dalla luce e da fonti di calore conservando il flacone nell'apposito astuccio in cartone.

Non utilizzare il prodotto dopo il periodo di validità riportato sull'astuccio.

Tale periodo si riferisce al prodotto conservato a temperatura non superiore a 25°C.

Il prodotto può essere utilizzato entro 28 giorni dall'apertura, pertanto, dopo tale periodo, il residuo non utilizzato deve essere eliminato.

La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.

## **AVVERTENZE**

Non utilizzare il prodotto se il confezionamento risultasse, al momento della prima apertura danneggiato o non perfettamente chiuso.

Non utilizzare il prodotto in caso di ipersensibilità specifica verso uno dei componenti.

Non ingerire il prodotto.

Tenere lontano dalla portata di bambini.

# RIPAGEL® VET

**Idrogel Oftalmico sterile**  
Flacone in polietilene 10 ml  
1,2% Acido ialuronico  
lineare e cross-linkato



Uso veterinario

MEDIVIS

IT

Idrogel Oftalmico sterile.  
Flacone in polietilene 10 ml.

RIPAGEL® VET è un idrogel indicato nella riparazione e riepitelizzazione della cornea che è stata soggetta a traumi dell'epitelio corneale causati da graffi, corpi estranei, sfregamenti e da ulcere corneali causate da infiammazioni/infezioni o causate anche da disfunzioni del film lacrimale.

Composizione: Idrogel sterile, isotonico, a base di ciclo-destrina in un'associazione di sodio ialuronato ad alto peso molecolare con acido ialuronico cross-linkato.



987449802