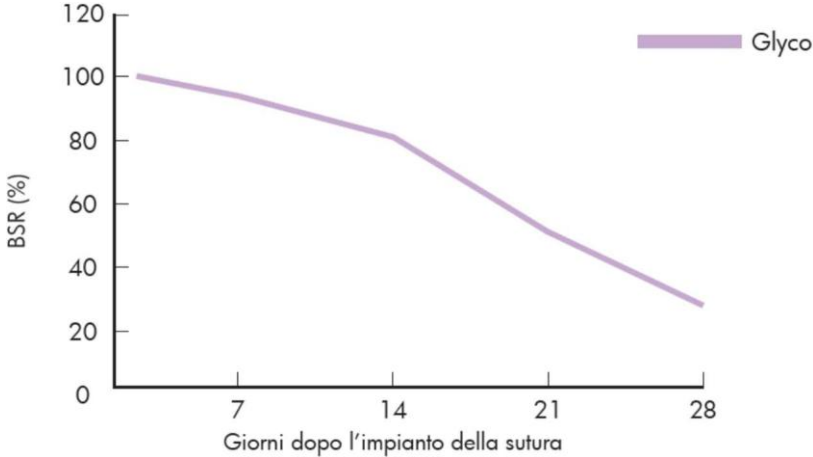


TIPOLOGIA	Sutura sintetica intrecciata intrecciata e rivestita												
COLORE	Viola o undyed (beige)												
MOLECOLA	Acido Poliglicolico (PGA)												
TIPO DI RIVESTIMENTO	Policaprolattone e stereato di calcio												
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Elevata resistenza tensile • Estrema maneggevolezza e facile esecuzione del nodo • Eccellente sicurezza di tenuta del nodo • Ottima scorrevolezza attraverso i tessuti • Profilo di assorbimento prevedibile 												
INDICAZIONI	Le suture PGA sono indicate per l'approssimazione e/o la legatura dei tessuti molli in generale, incluso l'uso nelle procedure oftalmiche. La sicurezza e l'efficacia delle suture Glyco nei tessuti cardiovascolari e neurali non è stata definita.												
RESISTENZA TENSILE IN VIVO	<p>La sutura Glyco, dopo due settimane dall'impianto, mantiene approssimativamente l'82% della resistenza alla rottura, dopo tre settimane circa il 56%.</p>  <table border="1"> <caption>Data for BSR (%) vs Giorni dopo l'impianto della sutura</caption> <thead> <tr> <th>Giorni dopo l'impianto della sutura</th> <th>BSR (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>~95</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>~55</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>~28</td> </tr> </tbody> </table>	Giorni dopo l'impianto della sutura	BSR (%)	0	100	7	~95	14	82	21	~55	28	~28
Giorni dopo l'impianto della sutura	BSR (%)												
0	100												
7	~95												
14	82												
21	~55												
28	~28												
ASSORBIMENTO	Avviene tramite idrolisi ed è completo all'incirca tra 60 e 90 giorni												
REAZIONE TISSUTALE	Minima												
STERILIZZAZIONE	Ossido di Etilene												
CALIBRI	USP da 8/0 a 2 EP da 0,4 a 5												
VALIDITA'	5 anni												
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore dirette e al riparo dalla luce solare diretta.												
CERTIFICAZIONE	CE 0373 Organismo Notificato "Istituto Superiore di Sanità"												
CLASSE DI APPARTENENZA	III												
CND	H010101020101												
REPERTORIO	1429740/R												
FABBRICANTE	BIO SUD MEDICAL SYSTEMS S.R.L. Via dei Fabbri, 23/25, Zona Artigianale ASI – 70026 Modugno (BA), ITALIA												