









BT Neck è un tutore ortopedico che nasce per aiutare cani e gatti con problemi alle vertebre cervicali, schiacciamento delle stesse, problemi neurologici e problemi di ernie.

L'effetto compressivo del tutore garantisce una compressione e una trazione del collo e protegge il medesimo anche in caso di ferite. Utile anche nei casi di disturbi ossessivo-compulsivi.

La funzione secondaria è quella di essere una valida alternativa al collare elisabettiano, che impedisce al cane di mordere la regione del corpo su cui è stato praticato un intervento. In questo modo non potrà rimuovere i punti di sutura o ingerire prodotti medicali applicati sulla ferita, proteggendo le zone del torace, del ventre, dei fianchi e rendendo difficile il raggiungimento delle zone vicino alla zampa anteriore (da gomito a spalla). Anche la zona perianale coinvolta da eventuali interventi di asportazione di ghiandole paranali, fistole o altro, risulta protetta.

### VANTAGGI

Maggiore praticità nell'applicazione e la minore invasività rispetto al collare elisabettiano (il cane può mangiare e bere senza costrizioni).

### **CARATTERISTICHE**

- ► Tessuto traspirante ed impermeabile (in caso di pioggia).
- ▶ Il tutore può essere utilizzato sia nel pre che nel post operatorio.
- ▶ Vestibilità.
- Lavabile a mano.

# **RACCOMANDAZIONI D'USO**

- ▶ Il collare BT Neck non è indicato per le razze di levrieri e bulldog. Il collo lungo dei primi non permette una stabilità del tutore, mentre il collo corto e tozzo del bulldog non permette l'applicazione di collari.
- ▶ Per un utilizzo corretto, è importante che il collare sia ben stretto intorno al collo, per evitarne la roteazione.
- Durante l'impiego del collare rigido, il cane può essere portato in passeggiata utilizzando indifferentemente il collare o la pettorina.
- ▶ Nell'arco delle 24 ore, togliere il collare per 1 o 2 ore.

## MISURE

Disponibile in sei taglie regolabili. Per determinare la taglia corretta, prendere la misura della circonferenza del collo del cane con un metro da sarta (misurare al centro del collo).

# Tg. Circonferenza collo

XXS misura unica per tutti i gatti

e per cani come Chihuahua o simili

e per can XS 25-35 cm S 35-45 cm M 45-55 cm L 55-65 cm

65-75 cm







-1

ΧI