



Dolore, zoppia, difficoltà motorie non preoccupano più: il tutore BT Hock è la soluzione ideale per aiutare a risolvere le lesioni del garretto. Il tutore prevede tre tasche per l'inserimento di due stecche laterali rigide e di una stecca anteriore regolabile. È impiegato nelle patologie che provocano lesioni nella regione del garretto, causando sintomi come dolore, zoppia o difficoltà di movimento. Il tutore, se utilizzato senza stecche, è utile anche in caso di patologie come artriti o artrosi. Infatti, l'effetto compressivo del materiale di cui è composto aumenta la pressione sanguigna nella zona del garretto e, di conseguenza, la temperatura. Si riduce così il dolore provocato dalle patologie.

La stecca anteriore è consigliata per quei casi in cui sia necessario bloccare completamente l'articolazione del garretto (ad esempio successivamente ad un'operazione, oppure a causa di problematiche neurologiche). Impiegato anche con funzione protettiva, può contenere cerotti o bende con eventuali medicamenti in caso di ferite chirurgiche o piaghe da decubito. È eccellente anche dopo un intervento chirurgico.

### VANTAGGI

Effetto stabilizzante e riduzione del carico: ecco come il tutore BT HOCK contribuisce a un pronto recupero funzionale prevenendo danni secondari. L'azione di tutoraggio migliora il lavoro dei legamenti attenuando il dolore; il minor carico allevia la parte lesa aiutando a ridurre il malessere e, in alcuni casi, la tumefazione. Il tutto senza impedire al cane i normali movimenti e garantendo un'ottima flessione e flessibilità dei muscoli, mentre i legamenti restano contratti. Le stecche rigide sono pensate per il bloccaggio dell'arto del cane all'altezza del garretto a seguito di un intervento chirurgico.

### CARATTERISTICHE

- ▶ Tessuto traspirante e lavabile a mano.
- ▶ Vestibilità.
- ▶ Può essere utilizzato sia nel pre che nel post operatorio.
- ▶ Nel tutore sono già incluse le due stecche laterali rigide e la stecca anteriore regolabile.
- ▶ Le stecche possono essere tolte sfilandole dalle apposite tasche.
- ▶ La stecca anteriore è regolabile.

### RACCOMANDAZIONI D'USO

- ▶ Durante il periodo di costrizione, è consigliabile non lasciare il cane solo per troppo tempo, perché potrebbe cercare di rimuovere il tutore, mordendolo o graffiandolo.
- ▶ **Attenzione:** se il cane viene portato fuori a correre o a giocare mentre indossa il tutore, quest'ultimo può causare arrossamenti da sfregamento dovuti al diretto contatto delle stecche rigide con la pelle. Raccomandiamo di prevenire tale eventualità mettendo una garza o un po di cotone tra le stecche rigide e la pelle del cane.
- ▶ In caso di utilizzo di stecche al tutore, consultare un veterinario.
- ▶ Rimuovere le stecche prima di ogni lavaggio.

### MISURE

Prodotto disponibile in cinque taglie regolabili:



\* La taglia XXS è indicata per Chihuahua e cani di peso compreso tra i 2 ed i 5 kg.

