

BT PULL

**TUTORE PER PATOLOGIE NEUROLOGICHE PARALISI AGLI ARTI
CON IPERFLESSIONE DELLE FALANGI A CARICO DEL NERVO SCIATICO,
NERVO PERONE COMUNE, PLESSO BRACHIALE O NERVO RADIALE.**



Il tutore è utile in caso di patologie neurologiche che causano gravi deficit propriocettivi per cui il cane non riesce a percepire la posizione del suo arto sul terreno, tendendo quindi ad appoggiare la zampa sul dorso (dorsoflessione). BT Pull è utile anche a seguito di danni al nervo sciatico (per esempio a seguito di una frattura del bacino o del femore), allo scopo di evitare che dal problema neurologico si crei un danno ortopedico di accorciamento dei tendini flessori del piede.

VANTAGGI

L'applicazione del tutore permette: la correzione dell'appoggio errato dell'arto; uno stimolo continuo e corretto delle vie nervose propriocettive, anche durante la camminata; uno stretching costante delle dita del piede e quindi dei tendini flessori delle dita, evitando così l'accorciamento di questi.

CARATTERISTICHE

- ▶ Tessuto traspirante.
- ▶ Lavabile a mano.
- ▶ Vestibilità.
- ▶ Nella confezione è presente un rinforzo realizzato con materiale spesso da applicare nei gravi casi di iperflessione delle falangi, che permette una migliore apertura delle stesse anche per i cani di grossa taglia. Il rinforzo può essere sfilato qualora non necessario.

RACCOMANDAZIONI D'USO

- ▶ Durante il periodo di costrizione è consigliabile non lasciare il cane solo per troppo tempo perché potrebbe cercare di rimuovere il tutore mordendolo o graffiandolo.
- ▶ Sciogliendo il nodo in cima al tutore, a fascia elastica può essere regolata per aumentare o diminuire il tensionamento della stessa e di conseguenza l'apertura delle falangi del cane.

MISURE

Disponibile in cinque taglie.

