

# BT BONE TUTORE PER FRATTURE DELLA ZAMPA ANTERIORE (RADIO-ULNA E RADIO-CARPO)



Il tutore BT Bone è l'alternativa alle comuni steccature o ingessature utilizzate per traumi causati dalla frattura della zampa anteriore compresa tra radio-ulna e radio-carpo.

È dotato di tre stecche rigide: una stecca fissa inserita in una tasca posta centralmente sulla parte posteriore e due stecche laterali, dotate di velcro per permettere il miglior posizionamento a seconda delle necessità.

L'impiego delle stecche garantisce il sostegno e la stabilizzazione dell'arto fratturato per il periodo d'impiego previsto dal proprio Veterinario.

Il tutore è realizzato in materiale traspirante che permette un utilizzo giornaliero in quanto evita piaghe da sudorazione o vesciche.

In caso di utilizzo di BT Bone, consigliamo di abbinare anche BT Joint, in quanto il suo impiego sulla zampa sana aiuterà il cane a compensare meglio il carico che la stessa deve sopportare a causa del deficit della zampa fratturata.

Una volta montato il tutore attorno alla zampa del cane non è necessario che i 2 bordi bianchi siano chiusi attorno alla zampa fino a toccarsi, in quanto la chiusura del tutore è determinata dalle fasce blu e l'azione di tutoraggio è data dalle tre stecche presenti nel tutore.

## CARATTERISTICHE


- ▶ Tessuto traspirante.
- ▶ Vestibilità.
- ▶ Lavabile a mano.

## RACCOMANDAZIONI D'USO


- ▶ Durante il periodo di costrizione, è consigliabile non lasciare il cane solo per troppo tempo, perché potrebbe cercare di rimuovere il tutore, mordendolo o graffiandolo.
- ▶ Rimuovere le stecche rigide prima di ogni lavaggio.

## MISURE

Disponibile in sei taglie, tutte regolabili in larghezza grazie alle cinghie realizzate in vellutino traspirante, che permettono di allargare o stringere il tutore.

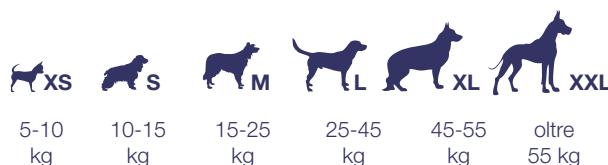

**Attenzione:** i pesi indicati sono puramente indicativi. In caso di dubbio, affidarsi esclusivamente alle misure in cm riportate.

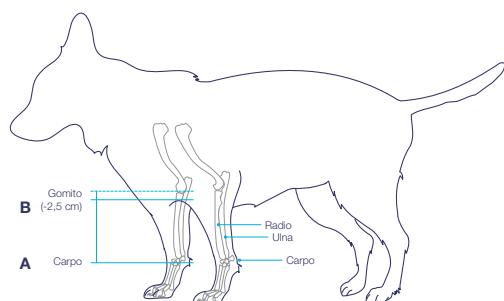

Con un metro da sarta, misurare la lunghezza della zampa anteriore (dal carpo a 2,5 cm sotto il gomito) e confrontare la tabella qui a fianco.



## Tg. Lunghezza A-B

<b>XS</b>	8-10,5 cm
<b>S</b>	11-14 cm
<b>M</b>	14,5-18 cm
<b>L</b>	18,5-21 cm
<b>XL</b>	22-27 cm
<b>XXL</b>	oltre 27 cm