

Lugol

IVD Dispositivo medico-diagnostico in vitro

Codice CND: W01030799

Codice	Taglio / Unità di vendita
05-M05015	500 ml
05-05015/L	1l

Validità: 2 anni

COMPONENTI

Iodio cristalli	1%	CAS 7553-56-2	EC No 2314424
Potassio ioduro	2%	CAS 7681-11-0	EC No 2316594
Acqua deionizzata			

APPLICAZIONE

- **Per Istologia**

Soluzione chelante per il mercurio. Viene utilizzata per il trattamento post-fissazione dopo l'impiego di fissativi a base di sali di mercurio.

MODALITÀ D'USO

Lugol soluzione	5 min.
Lavaggio	
Sodio iposolfito soluzione	5 min.

- **Per Microbiologia**

Soluzione utilizzata direttamente su campione fresco per l'evidenziazione di protozoi intestinali, uova o larve di elminti presenti nelle feci o in altri materiali.

I nuclei dei protozoi e gli organuli citoplasmatici risultano marroni e quindi più facilmente identificabili.

Per informazioni relative ai rischi che presenta il preparato, misure precauzionali da adottare durante l'uso e misure di primo soccorso è disponibile la relativa scheda di sicurezza.

Riferimento scheda sicurezza 05015

Data di emissione: ottobre 2009 **CE**