

Bio mount

IVD Dispositivo medico-diagnostico in vitro

Codice CND: W01030706

Codice	Taglio / Unità di vendita
05-BM250	1 x 250 ml
05-BM258	8 x 250 ml
05-BM500	1 x 500 ml
05-BM508	8 x 500 ml

Validità: 2 anni

COMPONENTI

Miscela di resine acriliche disciolte in xilene

APPLICAZIONE

Mezzo di montaggio sintetico per vetrini istologici e citologici

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

- Colore Trasparente
- Solubilità Insolubile in acqua; solubile in etere, chetoni, idrocarburi aromatici e D-limonene
- Indice di rifrazione 1,5
- Viscosità dinamica Da 250 a 450 mPa*s a 20°C

Il preparato risulta stabile in presenza di luce, calore, umidità e raggi UV

MODALITÀ D'USO

- Porre una o due gocce di Bio-Mount sulla sezione o sullo striscio e coprire con il coprioggetto. Bio Mount solidifica dopo 20-30 minuti e vetrifica dopo 3-4 giorni

Per informazioni relative ai rischi che presenta il preparato, misure precauzionali da adottare durante l'uso e misure di primo soccorso è disponibile la relativa scheda di sicurezza.
Riferimento Scheda Sicurezza: BM500

Data di emissione: ottobre 2009 