

OIL RED O
30-30112

IVD Dispositivo medico-diagnostico in vitro

Codice CND: W01030708

- taglio: **100 ml**
- confezione: **1 x 100 ml**
- temperatura di stoccaggio: **ambiente**
- validità del prodotto: **2 anni**

Applicazione

Colorante specifico per lipidi evidenziati selettivamente dalla molecola marcatamente lipofila dell'Oil red O.

La colorazione è facilitata dall'uso del fissativo di Baker (30-30111).

Metodo

Sezioni criostatiche da 5 micron

- | | | | |
|--|--------|--------------------------------------|---------|
| 1. Sezioni in fissativo di Baker a 4°C | 10 min | 4. Lavare in acqua di fonte | 1 min |
| 2. Lavare in acqua di fonte | 10 min | 5. Ematossilina di Mayer (05-M06002) | 1-2 min |
| 3. Soluzione di Oil red O | 20 min | 6. Lavare in acqua di fonte | 3 min |
| | | 7. Montare con montante acquoso | |

Componenti

Oil red O	CAS 1320-06-5	EC N° 2382096
Isopropanolo	CAS 67-63-0	EC N° 2006617

Risultati

Nucleiblu
Lipidirossi

Per ulteriori informazioni relative ai rischi che presentano i preparati costituenti il kit, misure precauzionali da adottare durante l'uso, misure di primo soccorso e smaltimento è disponibile la relativa scheda di sicurezza.

Data di emissione: ottobre 2009 **CE**