




Target	Rilevamento di anticorpi anti-Leptospira spp.			
Indicazioni per l'uso	Canì con sintomi compatibili con la leptospirosi canina: segni di danno renale e/o epatico acuto , malattia febbrile acuta, emorragia polmonare, anemia, uveite, aborto, segni di malattia infettiva sistemica.			
Campione	Sangue intero con anticoagulanti (eparina, citrato), siero o plasma			
Performance (with MAT cut-off of 1/800)	Sensibilità (n=50)	98 % ¹	Specificità (n=85)	93,5 % ¹
Confezione	Scatola con 5 test e scatola con 2 test (a breve disponibile) ❄️			

COME SI UTILIZZA?



IMPORTANTE!

Questo test utilizza una particolare pipetta ad autorientamento per l'erogazione precisa di un piccolo volume di campione nel test. La pipetta si riempie automaticamente per azione capillare quando viene posta a contatto con il campione. Per depositare il campione sul test, è sufficiente spremere il bulbo.

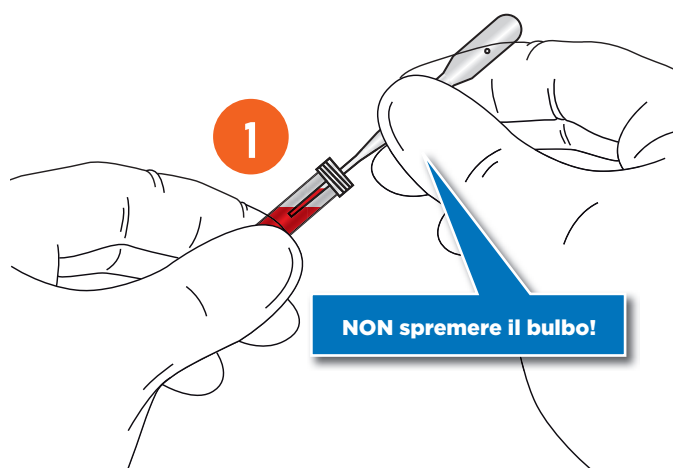

Afferrare la pipetta per lo stelo. Tenere la provetta del campione e la pipetta in modo da **formare un angolo** al fine di consentire il corretto riempimento della pipetta. **Senza spremere**, immergere la punta della pipetta nel campione. Il tubo capillare all'interno della pipetta si riempie automaticamente in 2-3 secondi. Una volta riempito il tubo capillare, rimuovere la pipetta dal campione.


2



Mettere in contatto la punta della pipetta con il tampone del campione e **spremere** attentamente il bulbo per erogare il campione (5 µl), prestando attenzione che **le dita coprano le aperture di sfogo del bulbo della pipetta**.

3

Aggiungere 4 gocce di soluzione tampone

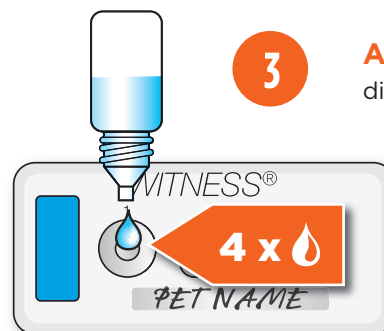

È anche possibile utilizzare una pipetta multiuso da 5 µl, non fornita in dotazione con il kit (rivolgersi al proprio contatto Zoetis).

LETTURA E INTERPRETAZIONE DEL RISULTATO



10 MINUTI DOPO*

Risultato positivo



0

Risultato negativo



** Il risultato del test deve essere interpretato alla luce del contesto clinico (anamnesi ed esame obiettivo dell'animale) e della conoscenza della patogenesi della malattia*

SUGGERIMENTI PER UN USO E UN'INTERPRETAZIONE CORRETTI

- ▶ Il test rivela la presenza di anticorpi IgM. In seguito all'esposizione, le IgM si sviluppano entro 1 settimana. Il titolo massimo di IgM viene raggiunto entro 14 giorni e in seguito si riduce¹
- ▶ Il test presenta reazioni crociate con le sierovarianti più diffuse (tra cui Grippotyphosa, Pomona, Icterohaemorrhagiae, Canicola, Bratislava) e non permette di distinguere una specifica sierovariante²
- ▶ Il test è progettato per evitare il rilevamento di anticorpi indotti da vaccini²
- ▶ In presenza di un quadro clinico di leptosirosi associato a un risultato negativo del test WITNESS® è necessario eseguire un test di controllo utilizzando un metodo di analisi complementare (MAT, PCR...)
- ▶ La presenza di segni clinici associata a un risultato positivo del test WITNESS® Lepto è fortemente indicativa di leptosirosi acuta

1 - Paul N. Levett - Clin. Applied immunol. Rev. 4 (2004) 435-488

2 - Dati di archivio Zoetis - Convalida esterna studio numero D866R-US-14-012

PROMEMORIA SULLA LINEA®



TEST PRONTI ALL'USO



**PICCOLO VOLUME
DEL CAMPIONE**



**PROCEDURA SEMPLICE
IN 2 PASSAGGI**



**RISULTATO RAPIDO
IN 10 MIN ****

** A seconda del test