

SCHEDA TECNICA

MULTIVETTE® 600 µL. Edta Rosso

codice prodotto: 15.1671

Pag. catalogo n.32

destinazione e modalità d'uso: **Esami di Ematologia**
Additivi: K3 EDTA

controindicazioni: nessuna – validità totale articolo mesi 36

Sistema di prelievo doppio, capillare e venoso

Multivette® 600

Nel prelievo venoso, il capillare del tubo della Multivette®, è connesso ad un ago Luer. Lo speciale design permette l'auto riempimento del tubo interno tramite la normale pressione venosa.

Sistema di prelievo igienico e sicuro grazie al principio della capillarità End-to-End. Lo speciale tubo capillare è idoneo a trattenere un volume di 600µl di sangue.

- *Prelievo venoso con ago Luer**
- *Sistema di prelievo igienico e sicuro con il principio della capillarità End-to-End*
- *Graduazione che assicura il controllo del volume*
- *Volume massimo di 600 µl*

- *Dopo il prelievo con ago Luer, assicurarsi di rimuovere l'ago dalla vena unitamente alla Multivette®*

Tale Multivette® è conforme alle normative vigenti, in possesso di marcatura CE e certificata DIN EN ISO 9001:2000.

descrizione dell'imballaggio ed etichettatura:

Scatola da 100 Pz. inserita in cartone da 1.000 Pz.

L'etichetta del cartone riporta il numero dei pezzi, il cod. articolo, la descrizione, modalità di sterilizzazione, scadenza del prodotto, n° lotto, marcatura CE, modalità di conservazione, dicitura monouso, nome della ditta produttrice.

condizioni di conservazione, avvertenze, precauzioni, modalità di smaltimento:

Condizioni di conservazione: Temperatura ambiente.
Modalità Smaltimento: Incenerimento Polipropilene (PP)