



Il tutore viene utilizzato per aiutare cani affetti da displasia dell'anca, riducendo il dolore grazie alla compressione bilaterale che esercita sulle anche. È efficace per tutti i gradi di displasia, compreso il grado E (il più grave).

Risulta utile anche per altre patologie (ad esempio artrosi all'anca). Ottimo come alternativa all'intervento chirurgico nel caso in cui il cane non possa essere operato. È realizzato in materiale sia contenitivo che compressivo, traspirante e lavabile.

BT LIFE viene fornito completo di 2 maniglie regolabili in lunghezza che si possono agganciare al tutore in caso di necessità, con le quali si può aiutare il cane a salire o scendere dalla macchina o dalle scale.

Le maniglie possono essere poi rimosse se non necessarie.

MISURE

Tg.	Circonferenza
XS	15-20 cm
S	25-30 cm
M	30-35 cm
L	40-45 cm
XL	50-55 cm

PREZZI

XS	149,90 €
S	149,90 €
M	179,90 €
L	179,90 €
XL	179,90 €

(I prezzi indicati sono IVA inclusa)

VANTAGGI

BT LIFE è formato da 2 dischi rigidi rivestiti da un doppio strato di materiale morbido ad alta densità. Questi dischi creano una compressione su entrambe le anche aumentando la temperatura corporea nella zona e riducendo quindi il dolore che il cane avverte a causa della patologia.

Un utilizzo costante del tutore porta un benessere concreto nella vita del cane riducendo parte degli effetti della displasia.

CARATTERISTICHE


- ▶ Riduzione del dolore grazie alla compressione bilaterale delle anche.
- ▶ Tessuto traspirante.
- ▶ Ottima vestibilità.
- ▶ Lavabile a mano.
- ▶ Fasce e maniglie regolabili.




RACCOMANDAZIONI D'USO

- ▶ Prendere la circonferenza della zampa all'altezza dell'inguine con un metro da sarta.



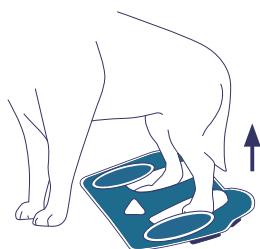


1
Aprire tutte le fasce, porre il tutore di fronte alle zampe posteriori del cane e infilarlo come un'imbragatura.

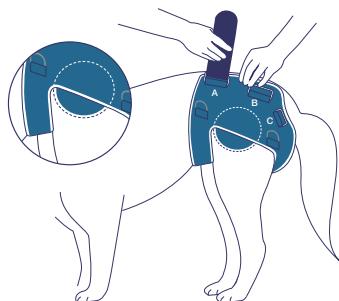


2
Prima di chiudere le fasce verificare che i dischi siano posizionati in corrispondenza delle anche.



3
Successivamente far passare le fasce facendole scorrere all'interno degli anelli bianchi e chiuderle su se stesse stringendo molto per garantire una corretta compressione.

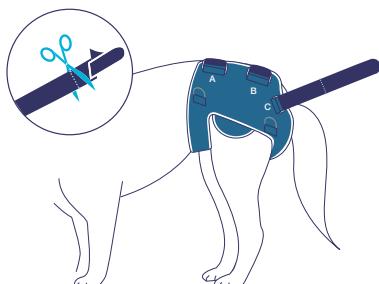

4
Nel caso le fasce risultino troppo lunghe è possibile accorciare rimuovendo l'estremità in velcro e tagliando il materiale in esubero.

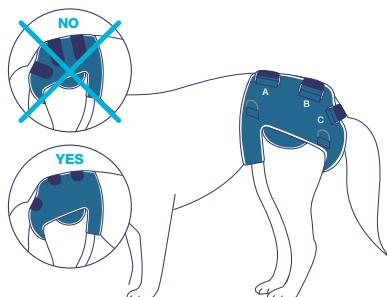

5
Riapplicare poi la parte in velcro e stringere le fasce in modo che le stesse si chiudano in prossimità della schiena e non attorno al tutore. È molto importante che il tutore sia chiuso ben stretto.



6
Applicare le maniglie in caso di necessità.