


ISTRUZIONI




1 - Aprire il velcro del Recova Shirt lasciando libere le due fasce posteriori. Far passare la testa del cane/gatto nella maglietta come illustrato.



2 - Inserire nei fori anteriori le zampe del cane/gatto. Nel caso fosse necessario, i fori possono essere allargati tagliandoli con una forbice.

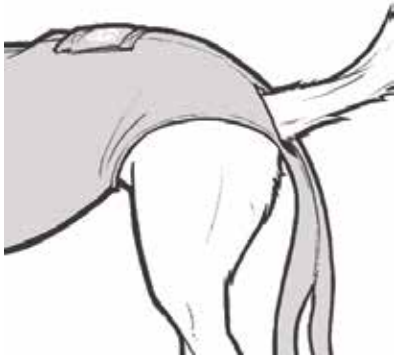

3 - Far passare la coda nel foro posteriore, lasciando libere le due fasce con il velcro.

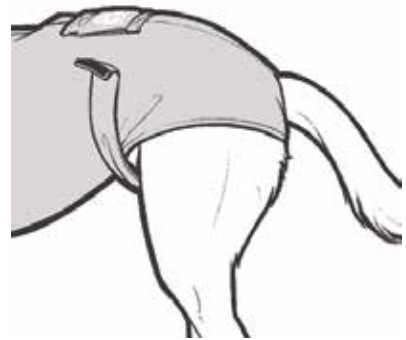

4 - Portare le fasce posteriori dall'interno coscia sul dorso del cane/gatto.



5 - Chiudere le due fasce sulla striscia con il velcro posteriore e coprire con il tessuto velcrabile.



6 - per permettere al cane/gatto di fare le proprie deiezioni, le fasce possono essere aperte e ripiegate su loro stesse in modo da lasciare libere le parti intime.