

COME SCEGLIERE LA TAGLIA CORRETTA


Indicazioni importanti & Misure

La scelta della misura esatta è **fondamentale** per ottenere i risultati desiderati. Scegliere una fascia troppo grande vanifica l'effetto della compressione graduata e di conseguenza l'efficacia nel contenimento e nella riduzione del gonfiore, mentre una fascia troppo piccola non solo non è efficace, ma può addirittura aggravare la condizione sottostante o determinare lo spostamento del gonfiore in un'area di minore resistenza, tipicamente verso l'alto.

Inoltre, è fondamentale tenere presente che il gonfiore dell'arto può variare nel tempo e anche più volte nell'arco della stessa giornata. Questo significa che è essenziale verificare spesso che la fascia calzi correttamente e, in caso, sostituirla con una fascia della taglia adeguata.

Qualora siano presenti delle condizioni patologiche sottostanti gravi o durante la fase acuta di gonfiore, usare le fasce può essere dannoso e pertanto il loro utilizzo deve essere discusso preventivamente con il proprio veterinario curante.

Per scegliere la taglia corretta, misurare con un metro a nastro (1) la circonferenza dell'articolazione metacarpo-falangea (ovvero del nodello) nel suo punto più largo; se è presente gonfiore si suggerisce di prendere la misura quando il gonfiore è il più attenuato possibile compatibilmente con la condizione presente; (2) la distanza partendo al di sotto del carpo/tarso e metà del pastorale così come indicato in figura:

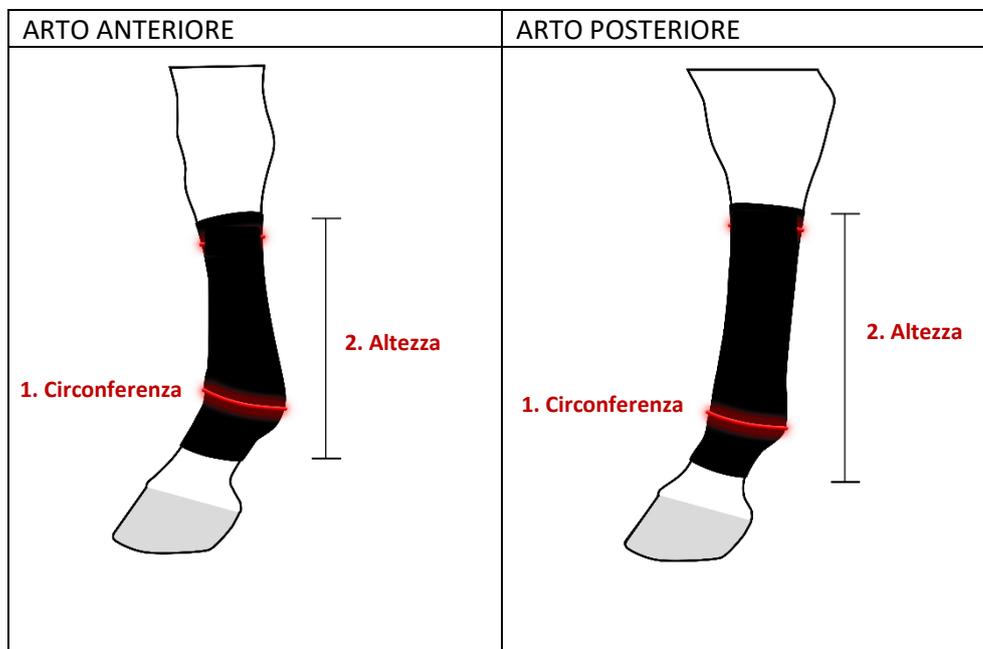

Con queste due misure è possibile scegliere tra le varie taglie disponibili e indicate nella "Tabella delle Taglie" che segue.

TABELLA DELLE TAGLIE

Fasce STANDARD

ANTERIORI			POSTERIORI		
TAGLIA	Circonferenza nodello	Altezza	TAGLIA	Circonferenza nodello	Altezza
					
S	24.0 – 26.0 cm	31 cm	S	26.0 – 28.0 cm	33 cm
M	26.1 – 28.0 cm	31 cm	M	28.1 – 30.0 cm	33 cm
L	28.1 – 30.0 cm	31 cm	L	30.1 – 32.0 cm	33 cm
XL	30.1 – 32.0 cm	31 cm	XL	32.1 – 34.0 cm	33 cm
XXL	32.1 – 34.0 cm	31 cm	XXL	34.1 – 37.0 cm	33 cm

Fasce SHORT

ANTERIORI			POSTERIORI		
TAGLIA	Circonferenza nodello	Altezza	TAGLIA	Circonferenza nodello	Altezza
					
S	24.0 – 26.0 cm	28 cm	S	26.0 – 28.0 cm	31 cm
M	26.1 – 28.0 cm	28 cm	M	28.1 – 30.0 cm	31 cm
L	28.1 – 30.0 cm	28 cm	L	30.1 – 32.0 cm	31 cm
XL	30.1 – 32.0 cm	28 cm	XL	32.1 – 34.0 cm	31 cm
XXL	32.1 – 34.0 cm	28 cm	XXL	34.1 – 37.0 cm	31 cm

Fasce LONG

ANTERIORI			POSTERIORI		
TAGLIA	Circonferenza nodello	Altezza	TAGLIA	Circonferenza nodello	Altezza
					
S	24.0 – 26.0 cm	33 cm	S	26.0 – 28.0 cm	36 cm
M	26.1 – 28.0 cm	33 cm	M	28.1 – 30.0 cm	36 cm
L	28.1 – 30.0 cm	33 cm	L	30.1 – 32.0 cm	36 cm
XL	30.1 – 32.0 cm	33 cm	XL	32.1 – 34.0 cm	36 cm
XXL	32.1 – 34.0 cm	33 cm	XXL	34.1 – 37.0 cm	36 cm