


REGOLAZIONE CORRETTA DEL TUTORE

Tutte le regolazioni di seguito indicate vanno effettuate **su entrambi i lati del tutore** prima di applicarlo.

1. Mettete il cane ritto sulle quattro zampe. Appoggiate il tutore sulla gamba del cane, verificando che lo **SNODO CENTRALE** sia posizionato all'altezza dell'articolazione del ginocchio.

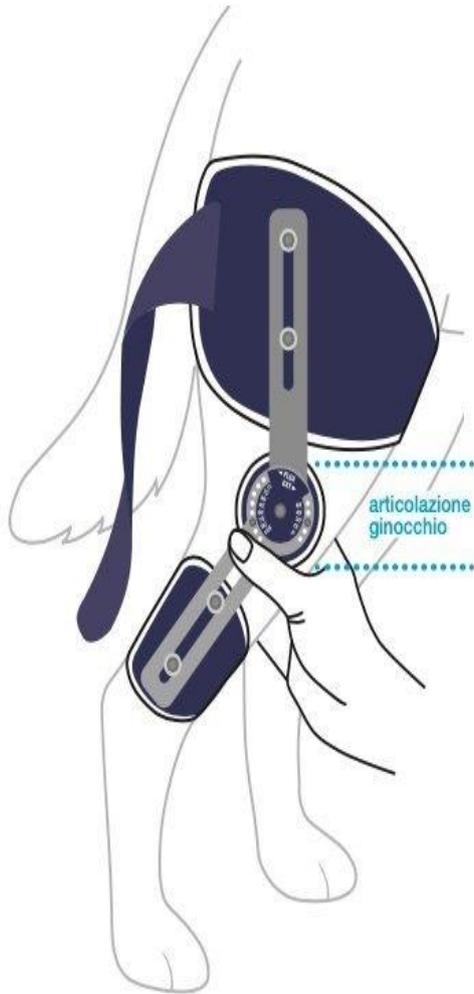

2. Regolate la posizione dell'**IMBOTTITURA INFERIORE**: utilizzando esclusivamente la **chiavetta più grande** in dotazione, allentate le due viti e regolate l'imbottitura in altezza, facendola scorrere

sul binario guida. Richiudete le viti.



3. L'imbottitura inferiore è nella **POSIZIONE CORRETTA** quando poggia alla base dell'articolazione del garretto, senza però bloccarla: **il tutore rimarrà così stabile, senza scendere, e l'articolazione resterà libera.**



Avvertenza: utilizzate solo le chiavi in dotazione. L'uso di avvitatori potrebbe danneggiare la filettatura delle viti.

4. Passate quindi a regolare la posizione dell'**IMBOTTITURA SUPERIORE**, con lo stesso procedimento visto per l'imbottitura inferiore.



Avvertenza: l'imbottitura superiore è sagomata sull'anatomia dell'animale e risulta quindi più bassa nella parte corrispondente all'interno coscia. Nell'applicare il tutore al cane è importante mantenere questa conformazione naturale.

REGOLAZIONE DELLO SNODO GRADUATO

Tutte le regolazioni di seguito indicate vanno effettuate su **entrambi i lati del tutore** prima di applicarlo.

5. Sistemata correttamente la lunghezza del tutore, passate alla regolazione dello **SNODO GRADUATO** utilizzando la chiavetta più piccola in dotazione.


PER BLOCCARE IL TUTORE*

Posizione 30° in flessione (FLEX)

Posizione 30° in estensione (EXT)

* Si consiglia il blocco totale dell'articolazione in caso di utilizzo del tutore prima di un intervento

chirurgico o sotto consiglio del veterinario.

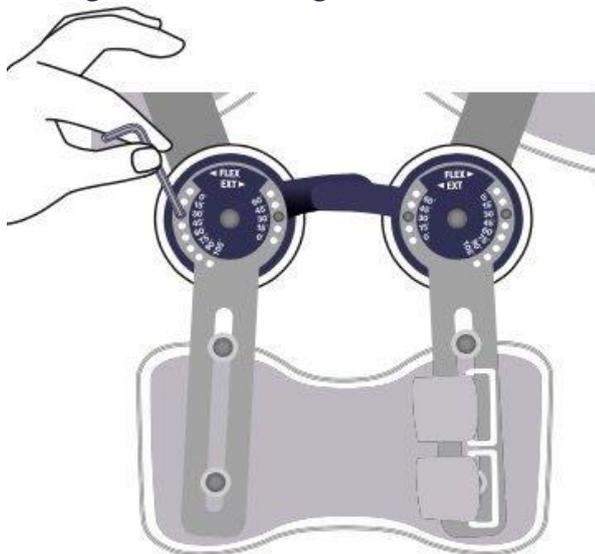

PER LIMITARE IL MOVIMENTO DELL'ARTICOLAZIONE**

Posizione 75° in flessione (FLEX)

Posizione 30° in estensione (EXT)

Per impedire il rischio di un'eventuale iper-estensione o iper-flessione del ginocchio.

** Utilizzare questa regolazione dopo un intervento chirurgico o in caso di utilizzo del tutore come alternativa all'operazione.



Lo snodo presenta una serie di 8 + 5 tacche graduate (da 0° a 105° in flessione, da 0° a 60° in estensione) che permettono di limitare o bloccare l'angolo di flessione ed estensione dell'articolazione, spostando le viti sulle diverse tacche.

Avvertenza: eventuali diverse regolazioni per soddisfare specifiche indicazioni, ad esempio nel trattamento post-operatorio o come alternativa all'intervento chirurgico, sono di **competenza esclusiva del VETERINARIO**.




APPLICAZIONE DEL TUTORE

Una volta regolata la lunghezza del tutore e le gradazioni dello snodo centrale, potete applicare il tutore sulla zampa del cane.

6. Fissate il tutore iniziando dalle 2 FASCE INFERIORI, facendole passare all'interno degli anelli piatti e assicurandovi di chiuderle ben strette. Ripetete la stessa operazione con la FASCIA

SUPERIORE singola.

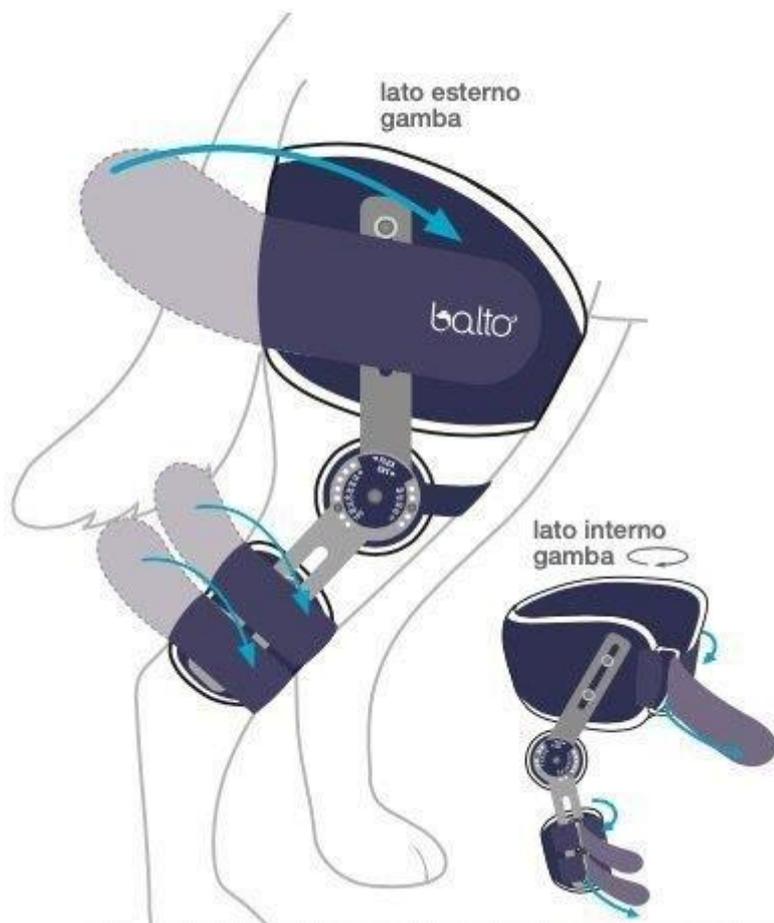

7. Infine fissate per bene la **FASCIA CENTRALE***, orientandola leggermente verso l'alto.

* La fascia centrale stabilizza i due snodi centrali durante il movimento di flessione, quando tendono leggermente a divaricare. Se il veterinario non la reputa necessaria, può essere tagliata lasciando libera la parte centrale del tutore.



Le tre fasce* che avvolgono la zampa del cane, fissando il tutore, sono **regolabili in lunghezza**: per farlo è sufficiente rimuovere la pinzetta in velcro, accorciare le estremità della fascia con le forbici e riposizionare la pinzetta in velcro.

Avvertenza: fate attenzione a non tagliare troppo le estremità, per consentire al velcro di

chiudere regolarmente sul tessuto.

* Il tutore è dotato di fasce sufficientemente lunghe, che consentono di fissare il tutore anche a cani fuori misura o sovrappeso.



RACCOMANDAZIONI D'USO

- **Nel post operatorio** rispettare le indicazioni del veterinario sulla tempistica di applicazione. In caso di edema post operatorio rimuovere il tutore fino al riassorbimento del gonfiore.
- **Non rimuovere gli adesivi** relativi ai gradi dello snodo e al verso del tutore.
- **Tenere pulito il tutore, eliminando l'eventuale presenza di peli**, soprattutto nelle parti interne dei velcri: utilizzare una spazzolina specifica per peli ogni 2/3 giorni.
- **Non lavare il tutore in lavatrice**: per una corretta pulizia rimuovere le imbottiture e lavarle a mano, in acqua fredda, con prodotti neutri.
- **Non utilizzare avvitatori** o altri strumenti elettrici per la regolazione delle viti.
- **Non forzare le viti** nel montaggio per non danneggiare le filettature. Oltre alle 2 chiavette, sono presenti nella confezione alcune viti di ricambio.
- **Non lasciare il tutore indossato al cane per tutta la giornata**: il tutore va portato di giorno, specialmente nei momenti di attività fisica, e va tolto nelle ore notturne.
- **Non lasciare solo il cane, con il tutore indossato, per troppo tempo**: potrebbe infatti caricare di rimuoverlo, mordendolo o graffiandolo.