

Si prega di notare:

La nostra guida rapida non sostituisce la lettura e l'osservazione del manuale operativo dettagliato.

Troverete qui maggiori dettagli e informazioni su come modificare il programma, caricare l'unità di controllo e pulire.



1


1 a Posizionare l'anello e la maschera sul muso del cavallo, assicurare la cinghia di fissaggio inserendo i due dispositivi per il fissaggio a sgancio rapido nei rispettivi alloggiamenti.



2

2 a Far scorrere l'unità di controllo lungo le guide fino a suo completo inserimento

2 b Inserire la membrana filtrante e far scorrere la griglia del filtro sulle guide poste a lato della maschera.

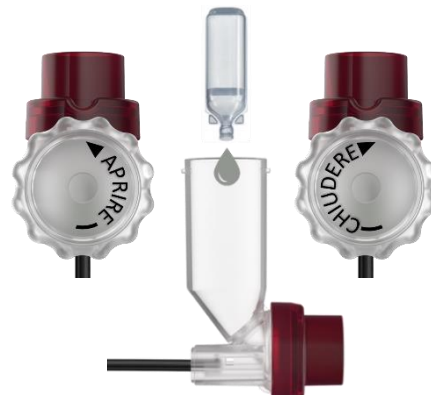

3

3 a Riempire il bicchierino nebulizzatore con la sostanza prescritta.

Leggere attentamente il manuale operativo



4

4 a Connettere il bicchierino collagando il cavo ad una delle due prese di alimentazione dell'unità di controllo.

4 b Far scorrere la copertura protettiva lungo le guide fino a quando non si blocca in posizione.



5

5 a Accendere l'unità di controllo tenendo premuto il tasto di accensione attraverso l'apertura posta sulla copertura protettiva.

5 b L'unità di controllo si spegne automaticamente quando non c'è alcuna quantità residua.